

# 4 ENZYMY!

## Sekusept MultiEnzyme P

Wstępne mycie narzędzi

---

Nowa i opatentowana kombinacja 4 enzymów, środków powierzchniowo-czynnych i pozostałych składników, czyni z Sekuseptu MultiEnzyme P produkt, który oferuje doskonałe właściwości myjące. Dodatkowo przyjemny zapach powoduje, iż Sekusept MultiEnzyme P to idealny, enzymatyczny produkt dla wszystkich rodzajów narzędzi medycznych i giętkich endoskopów.

### SZYBKO

Sekusept MultiEnzyme P wydajne i dokładne myje, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć ponownego procesu czyszczenia i mycia.

### PROSTO

Nowe poręczne opakowanie, szeroka gama dozowników mechanicznych i wyposażenia dodatkowego (wanny Sekusept) pozwalają w łatwy sposób przygotować właściwe stężenie preparatu.

### BEZPIECZNIE

Neutralne pH i właściwie dobrane składniki czynią z Sekusept MultiEnzyme P produkt o doskonałej kompatybilności materiałowej. Transparentny niebieski kolor roztworu wskazuje, iż produkt został dodany do roztworu (brak możliwości pomyłki), a wszystkie instrumenty są widoczne w kąpeli myjącej.



# Sekusept MultiEnzyme P

Wstępne mycie narzędzi

## Dlaczego Sekusept MultiEnzyme P?

Innowacyjna i opatentowana kombinacja 4 enzymów, substancji powierzchniowo-czynnych i pozostałych składników. Przyjemny zapach. 2 litrowa butelka z przezroczystym paskiem. Doskonała kompatybilność materiałowa. Wyważone właściwości pianące (niewielkie pienienie roztworu). Dostosowany do urządzeń dozujących: DG1, DG2, DG3.

### KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Najlepsze właściwości myjące. Najkrótszy czas mycia bez ryzyka konieczności powtórzenia procesu czyszczenia.
- ▲ Świeży nie irytujący zapach stwarza doskonałe warunki pracy.
- ▲ Łatwe operowanie butelką i dozowanie produktu.
- ▲ Doskonała ochrona dla kosztownych narzędzi medycznych.
- ▲ Odpowiedni do wanien i myjki ultradźwiękowej – dobra widoczność narzędzi w kąpeli.
- ▲ Łatwe i precyzyjne dozowanie.



### UWAGA

Sekusept MultiEnzyme P nie jest preparatem dezynfekcyjnym.



Ecolab Healthcare Europe  
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen, Zurich

Ecolab Sp. z o.o.  
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków  
www.ecolab.pl

© Ecolab MAY 2013. All rights reserved.

## 4 ENZYMY!

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Enzymatyczny produkt myjący do wszystkich rodzajów instrumentów medycznych włącznie z endoskopami giętkimi. Dostosowany również do myjki ultradźwiękowej i wstępnego mycia endoskopów.

### SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia, należy użyć od 3 do 20 ml Sekuseptu MultiEnzyme P na litr wody. Zanurzyć przedmioty, upewnić się, że są całkowicie zanurzone w roztworze. Myć narzędzia medyczne zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta sprzętu, jeżeli mycie tego wymaga usunąć pozostałe zanieczyszczenia mechanicznie (np. przy użyciu szczoteczki). Podczas stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zwrócić uwagę na przykrycie komory myjki w trakcie pracy urządzenia.

Do płukania używać wody o jakości co najmniej wody pitnej. Przy manualnym przygotowaniu endoskopów, wysuszyć zewnętrzne powierzchnie i wewnętrzne kanały endoskopu w celu uniknięcia rozcieńczenia preparatu dezynfekcyjnego, używanego w kolejnym etapie przygotowania. Należy nosić rękawice ochronne i ochronę twarzy podczas trwania całego procesu.

### SKŁAD

2 proteazy, amylaza, lipaza, związki powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji, substancje pomocnicze, emulgator.

### DOSTĘPNE PRODUKTY

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Butelka 2 l	4 szt.	3046650

### OPINIE

Liczne badania toksykologiczne i ekologiczne. Na Państwa prośbę chętnie udostępniemy opinie.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Przed użyciem preparatu należy zapoznać się z wytycznymi producenta narzędzi.