

Actichlor™ Plus N



Wygodne i skuteczne tabletki chlorowe do mycia i dezynfekcji o szerokim spektrum działania

Tabletka o szerokim spektrum działania do mycia i dezynfekcji podłóg i powierzchni ogólnych.

Actichlor Plus N jest chlorowym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni. Actichlor Plus N to:

- Skuteczna dezynfekcja chlorem w formie tabletek
- Szerokie spektrum działania odpowiednie dla szerokiej gamy zastosowań, w tym plamy krwi i dezynfekcja sporobójcza
- Łatwy w użyciu format do jednoetapowego mycia i dezynfekcji

Tabletka Actichlor Plus N łączy w sobie detergent kompatybilny z chlorem i NaDCC w jednej tabletce

- Pełne spektrum skuteczności
- Doskonała skuteczność mycia i dezynfekcji w jednym prostym kroku



Actichlor™ Plus N

Tabletka o szerokim spektrum działania do mycia i dezynfekcji podłóg i powierzchni ogólnych.

Charakterystyka produktu

- Biała tabletka uwalniająca aktywny chlor
- 1 tabletka (3,22 g) uwalnia 1 g aktywnego chloru
- Higroskopijny (trzymać z dala od wilgoci)
- pH po rozcieńczeniu (od 200 ppm do 10 000 ppm / lub 1 000 i 10 000) wodą z kranu: 6-7
- Przezroczysty, bezbarwny roztwór po rozcieńczeniu
- Roztwór roboczy może być używany do 24 godzin

Wyniki badań mikrobiologicznych

Skuteczność produktu	Stężenie	Czas kontaktu
Warunki brudne		
Bakteriobójczy według EN 13727/EN 16615	1000 ppm (1 tab/l)	5 min
Drożdżakobójczy według EN 13624/EN 16615	1000 ppm (1 tab/l)	5 min
Grzybobójczy według EN 13624	10000 ppm (10 tabs/l) 5000 ppm (5 tabs/l)	5 min 15 min
Prątkobójczy oraz bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348	5000 ppm (5 tabs/l)	15 min
Działanie wirusobójcze według EN 14476	1000 ppm (1 tab/l)	5 min
Sporobójczy wobec C. difficile według EN 17126/EN 17846	10000 ppm (10 tabs/l) 5000 ppm (5 tabs/l)	5 min 15 min
Sporobójczy według EN 17126	10000 ppm (10 tabs/l)	15 min
Warunki czyste		
Bakteriobójczy według EN 13727/EN 16615	200 ppm (1 tab/5L)	10 min
Drożdżakobójczy według EN 13624/EN 16615	200 ppm (1 tab/5L)	10 min
Grzybobójczy według EN 13624	5000 ppm (5 tabs/l) 2000 ppm (2 tabs/l)	5 min 15 min
Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348	200 ppm (1 tab/5L)	15 min
Prątkobójczy według EN 14348	1000 ppm (1 tab/l)	15 min
Działanie wirusobójcze według EN 14476	500 ppm (1 tab/2l)	5 min
Sporobójczy według EN 17126	10000 ppm (10 tabs/l) 5000 ppm (5 tabs/l)	5 min 10 min

Dostępne opakowania

Produkt	Opakowanie	Kod produktu
Actichlor™ Plus N	6 x 150 Tabletek	3084770

Dystrybutor:

ECOLAB SP. Z O.O.

ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



Obszar zastosowania

Tabletka o szerokim spektrum działania do mycia i dezynfekcji podłóg i powierzchni ogólnych.

Instrukcja użytkowania

Koncentrat. Całkowicie rozpuścić w wodzie (maks. 30°C) liczbę tabletek odpowiadającą wymaganemu stężeniu.

Aby rozcieńczyć np. do stężenia 1000 ppm, rozpuścić jedną tabletkę w 1 litrze wody; lub dla roztworu 10 000 ppm, dziesięć tabletek w 1 litrze wody.

Stosować w wystarczającej ilości (+/- 30 ml/m²). Przestrzegać wskazanego czasu kontaktu i warunków dla wymaganej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

W przypadku stosowania w warunkach czystych, należy wcześniej oczyścić powierzchnię (użyć czystej, świeżej ściereczki/mopa dla każdego kroku).

Płukanie nie jest konieczne, chyba że powierzchnia ma kontakt ze skórą.

Częstotliwość używania i czyszczenia sprzętu do aplikacji można znaleźć w obowiązującym w placówce planie higieny.

Skład

100g zawiera 52,31g troklosenu sodowego (NR CAS 2893-78-9). 1 tabletka (3,22 g) uwalnia 1,0 g chloru.

Przechowywanie

Pomiędzy 0°C a 25°C.

Produkt biobójczy: używaj bezpiecznie

Zapoznaj się z etykietą i informacją o produkcie.



PRODUKT BIOBÓJCZY PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI (KAT. 1 - GR. 2)

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™