

Anios'Clean Excel D



Mycie i dezynfekcja narzędzi przed sterylizacją

Środek do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi

- Opatentowana formuła
- Synergiczne połączenie substancji czynnych
- Nie powoduje korozji materiałów, wykazuje doskonałą kompatybilność materiałową
- Możliwe stosowanie w myjniach ultradźwiękowych
- Kompatybilny z robotem da Vinci




Anios'Clean Excel D

Środek do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi

Właściwości produktu

- Przezroczysty niebieski roztwór
- Wartość pH koncentratu: min. 6,5 - max. 7,5
- Wartość pH dla roztworu 0,5% w wodzie wodociągowej: 7,4
- Wartość pH dla roztworu 0,5% w wodzie miękkiej: 7,6
- Wartość pH dla roztworu 0,5% w wodzie zdemineralizowanej: 6,6

Sposób postępowania

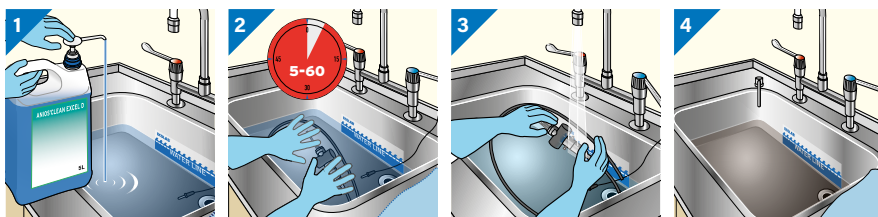

Koncentrat. Należy aktywować załączoną pompkę przed pierwszym użyciem. Należy stosować przez zanurzenie przy wymaganym stężeniu, z zachowaniem minimalnego czasu kontaktu (5 min).

Sprzęt medyczny należy w pełni zanurzyć. W trakcie dezynfekcji przez zanurzenie wannę z roztworem dezynfekcyjnym należy przykryć pokrywą. W razie potrzeby doczyścić szczoteczką.

Dokładnie spłukać wyroby medyczne wodą o jakości wody pitnej, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu i zabrudzeń organicznych.

Aby zachować skuteczność produktu, należy wymieniać roztwór roboczy zawsze, kiedy jest widocznie zanieczyszczony, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

Wyniki badań mikrobiologicznych

Spektrum działania	Stężenie	Czas działania
Bakteriobójczy* zgodnie z EN 13727/EN 14561	0.5%	5 min
Drożdżakobójczy* zgodnie z EN 13624/EN 14562	0.5%	15 min
Bójczy wobec prątków gruźlicy* według EN 14348/EN 14563	2.0%	60 min
Skuteczny wobec wirusów osłonkowych zgodnie z EN 14476/EN 17111	0.5%	15 min
Skuteczny wobec Polyomavirus SV40* zgodnie z EN 14476/EN 17111	2%	60 min

*=warunki brudne

Dostępne opakowania

Produkt	Ilość	Kod produktu
Anios'Clean Excel D	2 kan. x 5 L	3120100
Anios'Clean Excel D	12 x 1 L butelka	3120060
Anios'Clean Excel D	4 kan. x 5 L	3120080



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Dystrybutor:

ECOLAB SP. Z O.O. (PL, LT, LV, EE)
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

Obszar zastosowań

Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją.

Sposób postępowania

1. Koncentrat. Należy aktywować załączoną pompkę przed pierwszym użyciem. Należy stosować przez zanurzenie przy wymaganym stężeniu, z zachowaniem minimalnego czasu kontaktu (5 min).
2. Sprzęt medyczny należy w pełni zanurzyć. W trakcie dezynfekcji przez zanurzenie wannę z roztworem dezynfekcyjnym należy przykryć pokrywą. W razie potrzeby doczyścić szczoteczką.
3. Dokładnie spłukać wyroby medyczne wodą o jakości wody pitnej, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu i zabrudzeń organicznych.
4. Aby zachować skuteczność produktu, należy wymieniać roztwór roboczy zawsze, kiedy jest widocznie zanieczyszczony, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

Skład

Chlorek didecyldimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancja zapachowa, barwniki, substancje pomocnicze.

Przechowywanie

Niebezpieczeństwo - należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dokumentacja

Wyrób medyczny. Pełna dokumentacja produktu Anios'Clean Excel D dostępna na życzenie.

Wyroby medycznych używaj bezpiecznie

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™