

## DEZYNFEKCJA DROGĄ POWIETRZNĄ

### Aerosept 500

#### URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI DROGĄ POWIETRZNĄ

W pełni zautomatyzowany proces dezynfekcji oczyszczonych powierzchni metodą zamgławiania przy użyciu preparatu Aseptanios AD.

- Wydajność operacyjna: Pomieszczenia o kubaturze do 300 m<sup>3</sup>
- Panel z ekranem dotykowym, zdalne sterowanie oraz funkcja opóźnionego startu
- Opatentowany system dysz Venturi zapewnia nieprzerwany przepływ produktu
- Wygodny dostęp do danych dotyczących śledzenia cyklu w pamięci USB
- Szybka weryfikacja zgodności danych dotyczących pomieszczeń i użytkowników przy użyciu czytnika kodów kreskowych
- Zgodność z normą NF T72-281 (2014)



# Aerosept 500

Automatyczne urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną z wykorzystaniem suchej mgły.

## SKUTECZNOŚĆ

- W procesie dyfuzji roztwór jest podgrzewany do stałej temperatury 55°C, co zapewnia maksymalną wydajność
- Automatyczna regulacja dyfuzji zapewnia optymalną jakość mgły oraz jej skuteczność
- Doskonała stabilizacja stężenia na poziomie 7 ml / m<sup>3</sup> dzięki opatentowanemu systemowi Venturi wspartemu pompą perystaltyczną

## FUNKcjONALNOŚĆ

- W pełni zautomatyzowany proces - odczyt kodów kreskowych umożliwia dostęp do zapisanych ustawień dotyczących danego pomieszczenia i użytkownika
- Panel dotykowy: każdemu parametrowi odpowiada symbol ułatwiający konfigurację oraz uruchomienie
- Możliwość ustawienia opóźnionego startu w zakresie od 1 minuty do 9 godzin
- Łatwa wymiana roztworu

## BEZPIECZEŃSTWO

- Funkcja automatycznego określenia pozostałej objętości preparatu zapewnia uruchomienie urządzenia jedynie w sytuacji, gdy ilość środka będzie wystarczająca do dekontaminacji pożądanej kubatury danego pomieszczenia
- Automatyczne zatrzymanie urządzenia na koniec cyklu: wyświetlenie informacji o zakończeniu cyklu z prośbą o potwierdzenie ze strony operatora
- Zabezpieczenie przed chlapaniem: pojemnik wyposażony jest w przewód zabezpieczający przed bezpośrednim kontaktem z preparatem

## PRZEJRZYSTOŚĆ

Śledzenie oraz dostęp do istotnych informacji poprzez pamięć USB. Podłączenie pamięci USB do urządzenia pozwala uzyskać następujące informacje:

- Znaczniki czasu dla każdego cyklu
- Nazwy i kubatury dekontaminowanych pomieszczeń
- Dane użytkownika
- Czasy pracy urządzenia
- Czas wymiany zbiornika
- Ewentualne błędy

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Pojemność: 5-litrowy zbiornik
- Nominalna prędkość przepływu: 1 l / h
- Masa urządzenia: ≈ 32 kg
- Wymiary: 900 mm wys. x 350 mm dł. x 400 mm szer.
- Zasilanie: 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A

## DOSTĘPNE PRODUKTY

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Aerosept 500	1 szt.	10055020
Aseptanios AD	4 x 5 l	3101530



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Dystrybutor:  
**ECOLAB SP. Z O.O.**  
ul. Opolska 114  
31-323 Kraków  
Tel.: +48 12-26 16 100

HIGIENA  
POWIERZCHNI

## OBSZAR ZASTOSOWANIA

Automatyczne urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną uprzednio oczyszczonych powierzchni.

Należy stosować z ASEPTANIOS AD

- Bakteriobójczy w 30 min
- Drożdżakobójczy w 15 min
- Prątkobójczy w 60 min\*
- Grzybobójczy i sporobójczy w 120 min
- Wirusobójczy w 60 min\*

\*dla pomieszczeń o kubaturze do 150m<sup>3</sup>

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA\*

- Dezynfekowane powierzchnie należy wyczyścić przed rozpoczęciem procedury zamgławiania
- Ustawić urządzenie w rogu pomieszczenia
- Włączyć wybierając tryb pracy
- Wybrać pomieszczenie i operatora
- Urządzenie automatycznie obliczy czas dyfuzji
- Zostanie wyświetlony czas zakończenia cyklu
- Funkcja opóźnionego startu umożliwia operatorowi opuszczenie pomieszczenia przed rozpoczęciem procedury
- Po zakończeniu cyklu urządzenie wyłączy się automatycznie
- Należy przewietrzyć pomieszczenie (dziewięciokrotna wymiana powietrza)

\*Całość procedury została opisana w instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej

## PRZECHOWYWANIE

Produkty stosowane w niniejszym urządzeniu są niebezpieczne - należy zachować środki ostrożności wskazane na etykiecie produktu. Przechowywanie produktu: w zakresie temperatur od 5°C do 25°C w pozycji pionowej.

## DOKUMENTACJA

Dokumentacja dostępna na życzenie.

## STOSUJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



STOSUJ BIOCZYDY BEZPIECZNIE.  
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

**ECOLAB®**

www.ecolab.com